


Voir l'illustration


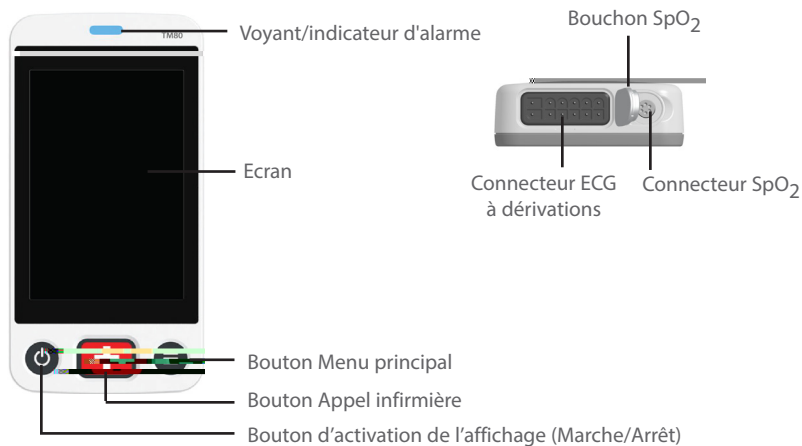


Naviguer

Commutation de l'orientation

1. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas sur l'écran principal pour afficher les boutons de commutation de l'orientation.
2. Sélectionnez le bouton souhaité.

Balayage pour obtenir des informations supplémentaires

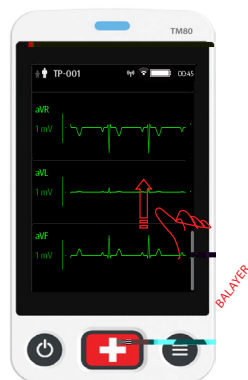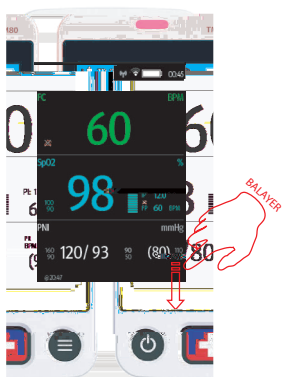

Déploiement des raccourcis



Remarque : Les raccourcis sont configurables. Les images ci-dessous ne sont que des exemples.

ECG

Contrôle de la stimulation

1. Appuyez sur la zone numérique FC ou sur la zone de tracé ECG pour accéder au menu **ECG**.
2. Réglez l'option **S** sur **O** ou **N**.

Changement de dérivation

Si **Chger dériv.** est configuré dans la zone des raccourcis, le fait d'appuyer sur **C** permet de passer du premier tracé ECG actuel au tracé ECG suivant disponible dans l'ordre séquentiel.


RESP ()

A


1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. **Chger dérivtimul1/La-FRw 10 0 0 10** **mr-FRMC BTag11 9ang (s/MCID 53**

S... BP10

Couplage d'un TM80 et d'un BP10

1. Appuyez sur la touche MPAN dans le volet droit du BP10.
2. Appuyez sur  pour accéder au menu principal du TM80.
3. Appuyez sur **M** → appuyez sur **MPAN** → sélectionnez **C** → sélectionnez le dispositif souhaité dans la liste des dispositifs → appuyez sur **C**.

Découplage à partir du TM80

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal du TM80.
2. Appuyez sur **M** → dans la liste des dispositifs, sélectionnez le dispositif que vous souhaitez déconnecter → appuyez sur **D** ou
3. Appuyez sur **M** → appuyez sur **MPAN** → sélectionnez **A**.


Découplage via le BP10

1. Appuyez sur la touche MPAN dans le volet droit du BP10.
2. Sélectionnez **O** lorsque le message d'invite "Etes-vous sûr de vouloir fermer MPAN et de découpler le BP10 ?" apparaît.


ATTENTION :

S	D
	Les alarmes sont acquittées et le système d'alarme est réinitialisé.

Modification des propriétés des alarmes de paramètre

1. Accédez au menu **L** **I** alarme de l'une des manières suivantes :
 - ◆ Sélectionnez le raccourci **Limites**
 - ◆ Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **A** → appuyez sur **L** **I**
2. Appuyez sur un paramètre et définissez ses propriétés d'alarme.

Modification des réglages d'alarme d'arythmie

1. Accédez au menu **R** **A** de l'une des manières suivantes :
 - ◆ Appuyez sur le raccourci **R** **A** s'il est configuré dans la zone des raccourcis.
 - ◆ Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **A** → appuyez sur **R** **A**
2. Appuyez sur un paramètre et définissez ses propriétés d'alarme.


Pause des alarmes

Appuyez sur le raccourci **Pause** ou



Appuyez sur  pour accéder au menu principal → à partir de la **I** **C** , appuyez sur **Pause**

Réinitialisation des alarmes


Appuyez sur le raccourci **Réinit.** ou

Appuyez sur  pour accéder au menu principal → à partir de la **I** **C** , appuyez sur **Réinit.**

D

1. Si l'affichage est éteint, appuyez sur  ou  pour l'activer et accéder au menu **Ecran verr.**
2. Saisissez le mot de passe pour déverrouiller l'écran.


Raccourcis de navigation

1. Appuyez sur  pour accéder au menu principal.
2. Appuyez sur **Volume audio**.
3. Sélectionnez la catégorie à ajuster et faites glisser le curseur au volume approprié.



Raccourcis de consultation




Consultation des événements

Appuyez sur le raccourci **Événements**, ou

Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **Revoir** → appuyez sur **Événements**.




Consultation des tendances tabulaires

Sur la page de revue des événements, sélectionnez l'onglet **T**,  ou .

Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **Revoir** → appuyez sur **T**,  ou .


Raccourcis de consultation de la veille

Accès à la boîte de dialogue Veille

1. Accédez à la boîte de dialogue Veille de l'une des manières suivantes :
 - ◆ Appuyez sur le raccourci **V**  s'il est configuré dans la zone des raccourcis.
 - ◆ Appuyez sur  pour accéder au menu principal → appuyez sur **V** .

2. Appuyez sur **O** .

Sortie du mode Veille

Appuyez sur  pour quitter le mode Veille.

Raccourcis de configuration

Configuration des alarmes

Appuyez sur le raccourci **A** . Ensuite, l'affichage du TM80 est toujours activé et les alarmes sont émises localement.

Configuration des paramètres

Appuyez sur le raccourci **D**, .

ind ay