

BeneVision

Système central de surveillance

Guide de référence rapide



mindray

REMARQUE :

- le guide de référence rapide n'est pas destiné à remplacer les instructions d'utilisation. Avant d'utiliser l'appareil, l'utilisateur doit avoir pris connaissance du contenu du manuel d'utilisation. Ce document fait office de procédure à n'utiliser qu'en complément d'une formation pratique complète.
- La fonction avec le symbole « * » indique les réglages configurables.

E a M u l i t i t (P a)	1
Raccourcis	3.....
Définir le mot de passe pour la commande à distance	4. .
Admission de dispositifs de surveillance.....	5. . . .
Déplacer un dispositif attribué d'une mosaïque patient à une autre*	5
Configurer la disposition de l'écran Multilit (principal)	6. .
C o n t r o l e P a t i e n t	7
Ecran de gestion patient	7.....
Saisissez les informations patient à l'aide de la base de données de l'hôpital (requête ADT).....	7.....
Importation des informations d'un patient libéré	8 . .
Attribuer un groupe personnel	9.....
T a b l e a u D e D o n n é e s P a t i e n t	10
S u i v i D e P a t i e n t	11
M o d e V e i l l e	12
Activation du mode Veille	12.....
Modifier l'emplacement d'un patient en mode Veille	12.
Quitter veille	12.....
A a l e r t e	13
Réglage des limites d'alarme	13.....
Réglage des réponses d'alarme	14.....
Réglage des alarmes d'arythmie.....	16. . . .
Réinitialiser des alarmes*.....	17.....
Pause des alarmes	18.....
Acquitter les alarmes verrouillées.....	18
I n t e r f a c e D e T a c h e E T R e p o n s e	19

M . . . D La P *20

Lance une mesure de la PNI..... 20.....

Définir une mesure PNI.....20.....

Arrêter la mesure de la PNI..... 21.....

M : D F i, i A i *21

Mode nuit..... 21.....


Mode privé..... 22.....

E a A .L i24

Accédez à l'écran Aff. lit.....25.....

1. Menu système

Sélectionnez cette option pour accéder à un menu déroulant pour effectuer des opérations avancées.

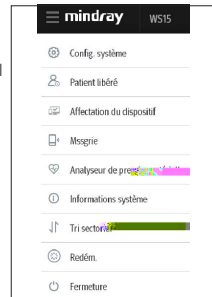

2. Informations de l'hôpital et messages d'alarme du système

Affiche les informations de l'hôpital et les notification d'alarmes.

Sélectionnez cette option pour consulter la liste de tous les messages d'alarme actuels du système.

3. Liste Alarme

Sélectionnez cette option pour afficher toutes les alarmes physiologiques et techniques de tous les dispositifs de surveillance du poste CentralStation/ WorkStation.

4. Touche d'impression

Sélectionnez cette option pour accéder aux informations d'impression à l'échelle du système, y compris les fonctions Imprimer résumé et File d'attente d'impr.


5. Date et heure du système

6. Mosaïque du patient

Affiche les informations patient, y compris les informations patient, les alarmes patient, les paramètres et les tracés en temps réel. Chaque mosaïque patient affiche les informations à partir d'un dispositif de surveillance à la fois.

7. Numéro de lit

Sélectionnez **EDV96** (par exemple) pour accéder à plus d'opérations pour le patient.

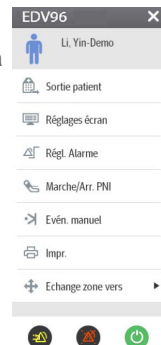










8. Informations patient










Sélectionnez cette option pour entrer et modifier les informations patient.

9. Ecran Multilit (principal)

10. Ecran étendu

Ra . . .

Symbole	Fonction
 Autres	Affiche d'autres raccourcis.
 Réglages alarmes	Ouvre le menu A a . . .
 Pause alarme	Suspend les alarmes actuelles pendant une durée prédéfinie.
 Marche/Arr. PNI	Démarrer ou arrêter les mesures PNI.
 ECG - Plein écran	Voir tous les tracés ECG.
 Charg. conf.	Ouvre le menu C a
 Régl. des param.	Ouvre le menu R a a a . . .
 Impr.	Imprime un rapport en temps réel.
 Mode privé	Active le mode privé.

Symbole	Fonction
 Réglages écran	Ouvre le menu R a . . . a . . .
 Réinit. de l'alarme	Acquitte les alarmes en cours pour la durée de l'alarme.
 Ecran principal	Permet de revenir à l'écran Multitilt.
 Veille	Passe en mode Veille.
 Figer	Fige les tracés.
 Microtend.	Affiche l'écran Microtend.
 Envoyer message	Envoie un message au TM80.
 Configurer l'impression	Ouvre le menu R a
 Night Mode	Active le mode nuit.

☒

Le menu ☒ sur l'écran Multilit (principal) donne au médecin l'autorisation pour le contrôle des moniteurs de chevet ou des dispositifs de télémétrie dans le poste CentalStation/WorkStation.

Pour définir la commande à distance sur le poste CentalStation/WorkStation :

1. Sélectionnez **mindray** sur l'écran Multilit (principal).
2. Sélectionnez ☒ dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez l'onglet A.
4. Sélectionnez l'onglet C à.
5. Sélectionnez
 - L : pour afficher uniquement les informations provenant des moniteurs ou des dispositifs de télémétrie.
 - A : pour commander à distance les moniteurs ou les dispositifs de télémétrie. Aucun mot de passe n'est requis.
 - M : pour modifier les réglages des alarmes provenant des moniteurs ou des dispositifs de télémétrie. Cela inclut les réglages d'alarme, les réglages d'arythmie, la mise en pause et la réinitialisation des alarmes. Un mot de passe est requis.
 - M : pour modifier les réglages des alarmes provenant des moniteurs ou des dispositifs de télémétrie. Cela inclut les réglages d'alarme, les réglages d'arythmie, la mise en pause et la réinitialisation des alarmes. Le mot de passe et le nom d'utilisateur enregistrés dans le serveur MLDAP sont requis.

A

Pour admettre des dispositifs de surveillance sur l'écran Multilit (principal) :

1. Sélectionnez une mosaïque patient vide avec **+** sur l'écran Multilit (principal) pour accéder à l'écran Affectation du dispositif.
2. Sélectionnez le service souhaité dans la liste déroulante à côté du **+**.
 - Local : pour afficher les dispositifs de surveillance du poste CentralStation local.
 - Service dans lequel un poste CentralStation distant est situé : pour afficher les dispositifs de surveillance du poste CentralStation distant.
3. Sélectionnez **+** à côté du dispositif de surveillance pour admettre ce dispositif.

Si plus d'un dispositif nécessite une admission, sélectionnez la mosaïque du prochain patient souhaité et répétez ces étapes.

REMARQUE :

Un dispositif de surveillance peut être admis à n'importe quel poste CentralStation/WorkStation, mais seulement à un seul poste CentralStation/WorkStation à la fois.

D

Pour déplacer un dispositif attribué d'une mosaïque patient à une autre sur l'écran Multilit (principal) :

1. Sélectionnez **EDV96** (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez **E** à côté du dispositif de surveillance...
3. Sélectionnez le patient souhaité dans la liste déroulante.

REMARQUE :

Le déplacement d'un dispositif attribué modifie uniquement son emplacement, il ne permet pas de modifier les informations du patient, mais il préserve toutes les données du patient.

Configurer la disposition de l'écran Multilit (principal)

Le menu **R** a **É** a de l'écran Multilit (principal) permet au médecin de modifier la disposition d'écran et la disposition d'affichage des paramètres ou des tracés dans la mosaïque patient :

Pour configurer la disposition de l'écran Multilit (principal) :

1. Sélectionnez **EDV96** (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Réglages écran dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez l'onglet Sélect. l'écran et l'option souhaitée.
 - Ecran normal : pour afficher les paramètres et les tracés en temps réel.
 - Grds chiffres : pour afficher les paramètres dans une grande taille de police.

Pour modifier la disposition de l'affichage des paramètres et des tracés dans la mosaïque patient :

1. Sélectionnez **EDV96** (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Réglages écran dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez l'onglet M en p bloc.
 - Sélectionnez la zone du tracé et sélectionnez le tracé souhaité à partir de la liste déroulante.
 - Sélectionnez la mosaïque de paramètre, puis sélectionnez le paramètre souhaité dans la liste déroulante.

REMARQUE :

Les paramètres et les tracés de l'onglet **A** a sont un surensemble et ne dépendent pas d'un dispositif de surveillance spécifique. Si un paramètre ou un tracé n'est pas pris en charge par le dispositif de surveillance, il ne s'affiche pas sur l'écran Multilit (principal).

CONFIGURATION PATIENT

Écran Gestion des patients

L'écran Gestion des patients permet au médecin de saisir et modifier les informations patient.

Pour saisir les informations patient dans le poste CentralStation/ WorkStation :

1. Sélectionnez l'onglet Gestion des patients de l'écran Accueil, l'écran Recherche, ou l'écran Carte.

REMARQUE :

L'onglet ADT est disponible uniquement lorsque la fonction ADT est activée.




Pour plus de détails, reportez-vous **Manuel de l'utilisateur du système central de surveillance BeneVision**.

1. Cliquez sur l'onglet **ADT** dans la barre de navigation.

Pour réadmettre un patient précédemment libéré :

1. Sélectionnez l'onglet **ADT** dans la barre de navigation, l'écran **ADT**, ou l'écran **Caution**.

ou

1. Sélectionnez **EDV96** (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité, puis sélectionnez  (icône de catégorie de patient).
2. Sélectionnez **ADT** dans la barre de navigation.
3. Sélectionnez l'onglet Patients libérés.
4. Saisissez les critères de requête.
5. Sélectionnez .
6. Sélectionnez  à côté du patient souhaité.
7. Sélectionnez **Données d'historique pour fusionner les informations patient et les données d'historique avec les données actuelles pour ce patient**.
8. Sélectionnez **Ok** pour confirmer.

Affectation d'un patient à un groupe personnel



Le groupe permet d'attribution d'un patient à un groupe personnel défini.

Les groupes personnels peuvent inclure les services, les soignants, le code d'identification de l'état, ou d'autres groupes définis par l'établissement.

Pour attribuer un groupe personnel :

1. Sélectionnez l'onglet **G** , au de l'écran **A** , l'écran **R** , ou l'écran **Ca** .

ou

1. Sélectionnez **EDV96** (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité, puis sélectionnez  (icône de catégorie de patient).
2. Sélectionnez  à côté du **EDV96** .
3. Faites défiler et sélectionnez le groupe personnel.
4. Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Après l'affectation d'un groupe personnel à un **bv117** (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité est remplie avec la couleur du groupe personnel.

REMARQUE :

Si les dispositifs de surveillance sont fixes dans la mosaïque, le groupe personnel reste attribué lors de la sortie du patient. Si les dispositifs de surveillance sont flexibles dans la mosaïque, le groupe personnel est supprimé lors de la sortie.


TRANSFERT DES DONNEES PATIENT

La fonction de transfert permet au médecin de déplacer les informations patient d'un dispositif de surveillance à un autre dispositif de surveillance.

Pour transférer les données patient d'un dispositif de surveillance à un autre dispositif de surveillance sur un même poste CentralStation/WorkStation :

1. Sélectionnez l'onglet **G** (par exemple) de l'écran **A** (par exemple), l'écran **R** (par exemple) ou l'écran **Ca** (par exemple).


ou

1. Sélectionnez **EDV96** (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité, puis sélectionnez  (icône de catégorie de patient).
2. Sélectionnez Transférer patient et sélectionnez **L** (par exemple) dans le service de destination.
3. Faites défiler et sélectionnez le lit ou numéro de chambre souhaité à partir de la liste **S** (par exemple).
4. Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Pour transférer les données patient d'un poste CentralStation/WorkStation à un autre poste CentralStation/WorkStation :

1. Sélectionnez l'onglet **G** (par exemple) de l'écran **A** (par exemple), l'écran **R** (par exemple) ou l'écran **Ca** (par exemple).

ou

1. Sélectionnez **EDV96** (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité, puis sélectionnez  (icône de catégorie de patient).
2. Sélectionnez Transférer patient et sélectionnez **A** (par exemple) dans le service de destination.
3. Faites défiler et sélectionnez le lit ou numéro de chambre souhaité à partir de la liste **S** (par exemple).
4. Sélectionnez **OK** pour confirmer.

Le temps de transfert des données dépend de la quantité de données stockées sur le patient. Une fois le transfert terminé, la mosaïque du patient source affiche **Sortie**. Le message **Transfert des données...** s'affiche dans la zone d'informations d'alarme de la mosaïque patient de destination, indiquant que la fusion des données patient de la source vers la mosaïque patient de destination est en cours.

REMARQUE :

- Pour assurer la conservation des données pendant le transfert, la date et l'heure du système du poste CentralStation/WorkStation doivent être cohérentes.
- Pour assurer la sécurité du patient, surveiller le patient à la source et à destination pendant le transfert.

SORTIE D'UN PATIENT


La sortie d'un patient efface toutes les informations relatives au patient, place le patient dans la liste des **Alertes** et restaure les paramètres par défaut (prédéfinis).

Les patients peuvent être libérés du poste CentralStation/WorkStation, d'un moniteur de chevet ou d'un moniteur de télémétrie TD60/TM80. Pour plus de détails sur la sortie d'un patient des dispositifs de surveillance au chevet du patient, reportez-vous au manuel d'utilisation correspondant.

Pour procéder à la sortie d'un patient à partir du poste CentralStation/WorkStation :

1. Sélectionnez l'onglet **G** au **de l'écran A**, l'écran **R** ou l'écran **Ca**.

ou


1. Sélectionnez **EDV96** (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité, puis sélectionnez  (icône de catégorie de patient).
2. Sélectionnez **Sortie patient**.
3. Sélectionnez **Impr. rapport Sortie patient** si vous le souhaitez.
4. Activez le mode **Veille** si vous le souhaitez.
5. Sélectionnez **OK** pour confirmer.

MISE EN VEILLE

Activation du mode Veille

La fonction Veille permet au médecin d'interrompre la surveillance d'un patient. Lorsque le moniteur est en mode Veille, le patient n'est pas surveillé. Cependant, tous les paramètres et données sont conservés.

Pour placer un patient en mode Veille sur le poste CentralStation/WorkStation :


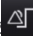
1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ALARMES


Régler les limites d'alarme

Le menu Alarme permet au médecin de configurer les limites d'alarme de tous les paramètres et les réponses du poste CentralStation/ WorkStation lorsqu'une alarme se déclenche.


Pour régler une limite d'alarme via le menu Alarme :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez  :EDV96 (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Régl. Alarme dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez l'onglet Limites.
4. Sélectionnez les paramètres souhaités.
5. Faites défiler et sélectionnez la valeur souhaitée pour la limite haute ou basse.

Pour régler une limite d'alarme via le menu de réglage d'un paramètre :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou



1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez une valeur numérique ou un tracé du paramètre souhaité.
3. Sélectionnez l'onglet Alarme.
4. Faites défiler et sélectionnez la valeur souhaitée pour la limite haute ou basse.

REMARQUE :


Les limites d'alarme modifiées sur le poste CentralStation seront également modifiées sur le poste WorkStation ou le moniteur de chevet.

Régler les réponses d'alarme :


Pour régler les réponses d'alarme via le menu :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez  (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Régl. Alarme dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez l'onglet Limites.
4. Sélectionnez les paramètres souhaités.
5. Sélectionnez Sorties alarme puis l'option souhaitée :
 - Arr : pour désactiver les sorties alarme.
 - Mssgrie : pour envoyer les informations d'alarme sur un bipeur configuré lorsqu'une alarme est déclenchée.
 - Imprimer : pour envoyer les informations d'alarme sur une imprimante configurée et imprimer lorsqu'une alarme est déclenchée.
 - Tous : pour envoyer les informations d'alarme sur un bipeur configuré et imprimer lorsqu'une alarme est déclenchée.

Pour régler les réponses d'alarme via le menu de réglage d'un paramètre :


1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez une valeur numérique ou un tracé du paramètre souhaité.
3. Sélectionnez l'onglet Alarme.
4. Sélectionnez Sorties alarme puis l'option souhaitée :
 - Arr : pour désactiver les sorties alarme.
 - Mssgrie : pour envoyer les informations d'alarme sur un bipeur configuré lorsqu'une alarme est déclenchée.
 - Imprimer : pour envoyer les informations d'alarme sur une imprimante configurée et imprimer lorsqu'une alarme est déclenchée.
 - Tous : pour envoyer les informations d'alarme sur un bipeur configuré et imprimer lorsqu'une alarme est déclenchée.

REMARQUE :



Si les paramètres d'alarme commandés sont contrôlés à distance, les paramètres d'alarme ne peuvent pas être modifiés sur le poste CentralStation/WorkStation.

 s'affiche à côté de l'option d'activation/désactivation de l'alarme d'un paramètre pour indiquer cette limitation.

- Mar/Arr : pour activer ou désactiver la notification des alarmes d'arythmie.
- Priorité : pour régler le niveau de l'alarme.
- Sorties alarme : pour activer ou désactiver les fonctions automatiques lorsqu'une alarme se déclenche. Pour plus de détails sur chaque option, reportez-vous à la section **Réglage des réponses d'alarme** pour plus de détails.

Réinitialiser les alarmes :



Pour réinitialiser les alarmes (silence) sur un patient :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez  (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  dans la liste déroulante.

ou

Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou



Sélectionnez Réinit. de l'alarme (touche ou raccourci) sur le dispositif de surveillance.

REMARQUE


Si une nouvelle alarme est déclenchée après la réinitialisation d'une alarme, les indications d'alarmes visuelles et sonores sont réactivées.

Pauses des alarmes



Pour mettre en pause toutes les alarmes pendant une période pré-configurée :


1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez  (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  dans la liste déroulante.

Une fois le temps de pause de l'alarme écoulé, toutes les alarmes sont automatiquement réactivées. Les alarmes peuvent être réactivées avant l'écoulement du temps en sélectionnant  une deuxième fois (raccourci).

Alarmes mortelles

Les alarmes mortelles peuvent être verrouillées et doivent être acquittées même si la condition d'alarme est résolue.

Les alarmes verrouillées peuvent être acquittées en sélectionnant  (raccourci).



Pour plus de détails sur la réinitialisation des alarmes, reportez-vous à la section Réinitialisation des alarmes pour plus de détails.

REMARQUE


Une alarme non acquittée et verrouillée continue d'alarmer le patient (notifications audio et visuelles) même après la résolution de la condition d'alarme.

IMPRESSION DES TRACES EN TEMPS REEL



Pour imprimer un rapport de toutes bandes de tracés actuels sur un patient au poste CentralStation/WorkStation :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourç).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourç).


ou

1. Sélectionnez  (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  dans la liste déroulante.

Pour ajuster les tracés imprimés sur le patient au poste CentralStation/WorkStation :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourç).
3. Sélectionnez l'onglet **Rapport normal**.
4. Sélectionnez l'onglet **Rapport Temps réel**.
5. Sélectionnez
 - Tracés actuels: pour imprimer les tracés affichés.
 - Tracés sélectionnés: pour imprimer les tracés sélectionnés.



REMARQUE

La sélection de l'impression de la forme de tracé sur le poste CentralStation/WorkStation est indépendante.


MESURES DE LA PNI*

La mesure de la PNI :


Pour démarrer une mesure PNI sur un patient :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

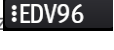1. Sélectionnez  (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Marche/Arr. PNI à partir de la liste déroulante.

AVERTISSEMENT :

Avant de démarrer une mesure PNI, assurez-vous que la catégorie du patient sur le dispositif de surveillance est correcte et que la taille du brassard PNI convient à ce patient.



Démarrage et arrêt de la mesure PNI

En plus du démarrage et de l'arrêt et d'une mesure PNI sur un dispositif de surveillance, il est possible de régler des mesures PNI automatiques (intervalles). Les mesures PNI seront automatiquement répétées à un intervalle préconfiguré.

Pour définir un intervalle de mesure PNI sur un patient :



1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou


1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez les valeurs numériques de la PNI.
3. Sélectionnez l'onglet  à l'onglet .
4. Définissez l'option souhaitée et sélectionnez l'option souhaitée.

A Arrêter la mesure de la PNI


Pour arrêter la mesure en cours :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez :EDV96 (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Marche/Arr. PNI à partir de la liste déroulante.

MODES DE FONCTIONNEMENT ALTERNES*


Cette section décrit uniquement comment activer les modes opératoires suivants sur le poste CentralStation/WorkStation uniquement. Pour plus d'informations sur le réglage de la commande à distance pour ces modes, reportez-vous au *manuel de l'utilisateur du système central de surveillance BeneVision*.

Mode nuit


Pour activer le mode nuit :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou



1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou


1. Sélectionnez :EDV96 (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Mode nuit dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez le moniteur de chevet actuel ou tous les moniteurs de chevet.
4. Sélectionnez OK pour confirmer.

Le symbole  s'affiche dans la mosaïque du patient souhaité en mode nuit.


Désactivation du mode nuit :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourç).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourç).

ou

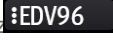1. Sélectionnez  (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Mode nuit dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez le moniteur de chevet actuel ou tous les moniteurs de chevet.
4. Sélectionnez OK pour confirmer.



REMARQUE

Le mode nuit peut être activé sur le moniteur de chevet connecté au poste CentralStation/WorkStation. Si le moniteur de chevet en mode nuit est déconnecté du poste CentralStation/WorkStation, le mode nuit sera automatiquement désactivé.


Mode privé

En mode privé, le moniteur de chevet n'affiche ni les informations patient ni les données de surveillance. En mode privé, le moniteur de chevet continue de surveiller le patient, mais les données patient ne sont visibles que sur le poste CentralStation/ WorkStation.


Pour activer le mode privé :


1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourç).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourç).

ou

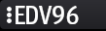

1. Sélectionnez  (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Mode privé dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez le moniteur de chevet actuel ou tous les moniteurs de chevet.
4. Sélectionnez OK pour confirmer.

Le symbole  s'affiche dans la mosaïque du patient souhaité.


AVERTISSEMENT :

En mode privé, toutes les alarmes sonores sont supprimées et le témoin d'alarme est désactivé sur le moniteur de chevet. Les alarmes ne sont affichées que sur le poste CentralStation/ WorkStation.


Pour désactiver le mode privé :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

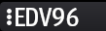
1. Sélectionnez  (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Mode privé dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez le moniteur de chevet actuel ou tous les moniteurs de chevet.
4. Sélectionnez OK pour confirmer.

REMARQUE :

Le mode privé peut être activé sur le moniteur de chevet connecté au poste CentralStation/WorkStation. Si le moniteur de chevet en mode privé est déconnecté du poste CentralStation/WorkStation, le mode privé sera automatiquement désactivé.

ECRAN AFF. LIT

L'écran Aff. Lit fournit une vue plus détaillée des informations d'un seul patient.

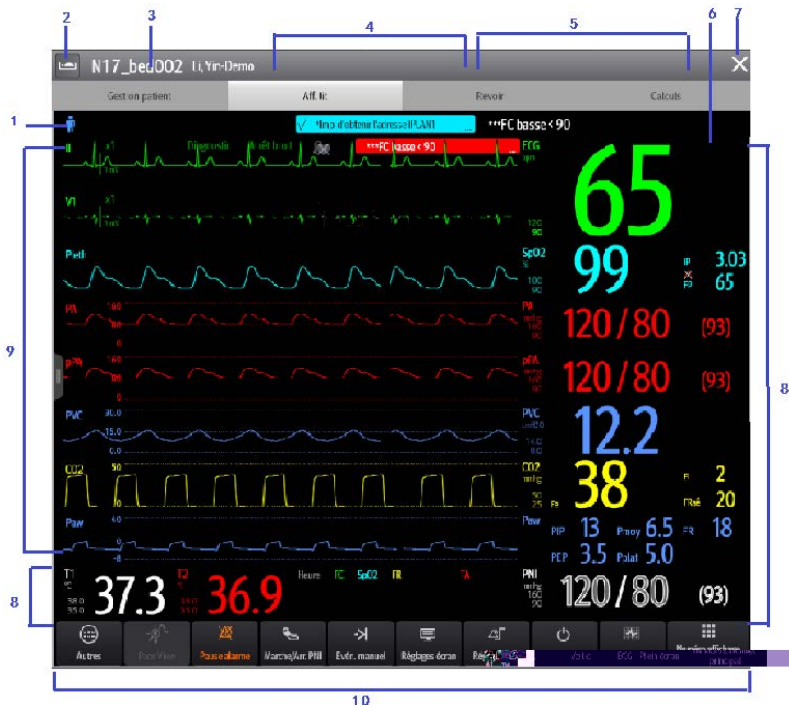

1. Symbole de la catégorie patient

2. Icône de liste des lits

Sélectionnez cette option pour afficher la liste des lits de tous les patients locaux du poste CentralStation/WorkStation ou des patients surveillés à distance.

3. Numéro de lit

4. Zone des infos alarmes techniques

5. Zone des infos alarmes physiologiques

6. Symbole de l'état d'alarme

7. Bouton Fermer

Sélectionnez pour revenir à l'écran Multilit (principal).

8. Zone des paramètres

Affiche les valeurs des paramètres, les limites d'alarme et les états d'alarme.

La sélection d'un paramètre ouvre le menu du paramètre correspondant..

9. Zone des tracés

Affiche les paramètres des tracés. Sélectionnez un tracé pour ouvrir le menu du paramètre correspondant.

10. Zone des raccourcis

Sélectionnez cette option pour accéder aux fonctions fréquemment utilisées.

A  à  **a** **A** . . **u**.



Pour accéder à l'écran **A** . . **u** :

- Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité à partir de l'écran Multilit (principal).



ou

- Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.


Ajuster la disposition de l'écran Aff. lit

Le menu **R**  **a**  **a** de l'écran Aff. lit permet au médecin de modifier la disposition de l'écran et d'afficher les paramètres ou les tracés sur l'écran Aff. lit.

Pour configurer la disposition de l'écran **A** . . **u** :



1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou


1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).
3. Sélectionnez l'onglet Écran Aff. lit.
4. Sélectionnez l'onglet Sélect. l'écran et l'option souhaitée.

- Ecran normal : pour afficher les paramètres et les tracés en temps réel.
- Microtend. : pour afficher un écran divisé avec microtendances sous forme graphique affichées en continu sur le côté gauche, outre les tracés en temps réel et les paramètres numériques sur l'écran principal.
- OxyCRG: pour afficher un écran divisé avec oxyCRG (tendance FC, tendance SPO2 et tendance FR/tracé FR) dans la partie inférieure de l'écran avec tracés en temps réel et paramètres numériques.
- ECG - Plein écran pour afficher les dérivations ECG avec paramètres numériques sur l'écran principal.

Pour ajuster les paramètres ou les tracés affichés par le patient sur l'écran :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  (raccourci).
3. Sélectionnez l'onglet **Ecran Aff. lit.**
4. Sélectionnez l'onglet **Config.Affichage** et l'option souhaitée.
 - Sélectionnez le paramètre souhaité dans la liste déroulante.
 - Sélectionnez le tracé souhaité dans la liste déroulante.


REMARQUE :

- Les paramètres et les tracés de l'onglet  .

ANTECEDENTS

Les données historiques des patients sont stockées et peuvent être consultées. L'écran Revoir fournit plusieurs onglets pour afficher les informations numériques et de tracé du patient.


Pour revoir les données historiques d'un patient actuel :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou


1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet **R** à partir de l'écran **A**.

Pour revoir les données historiques d'un patient précédemment libéré :



1. Sélectionnez  **mindray** sur l'écran Multilit (principal).
2. Sélectionnez **Patient libéré** dans la liste déroulante.
3. Sélectionnez **Détails** pour le patient souhaité.
4. Sélectionnez l'onglet **Revoir**.

Afficher et imprimer les tendances tabulaires au poste CentralStation/WorkStation :


Pour afficher et imprimer les tendances tabulaires au poste CentralStation/WorkStation :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.




ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet **R** à partir de l'écran **A**.
3. Sélectionnez  sur l'écran **Revoir**.
4. Sélectionnez **Tendances tab** dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez .
6. Vérifiez ou ajustez les options de configuration d'impression.
7. Sélectionnez **Impr.**

Pour ajuster le nombre et les types de types de tendances affichés sur la page des tendances tabulaires :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou


1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran .
3. Sélectionnez  sur l'écran Revoir.
4. Sélectionnez Tendances tab dans la liste déroulante.
5. Définissez Groupe tend. et sélectionnez l'option souhaitée.
6. Définissez Interv. et sélectionnez l'option souhaitée.

REMARQUE





Les paramètres affichés pour Groupe tend. dépendent des paramètres disponibles sur un dispositif de surveillance.

Afficher et imprimer les tendances graphiques

Pour afficher et imprimer les tendances graphiques au poste CentralStation/ WorkStation :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran .
3. Sélectionnez  sur l'écran Revoir.
4. Sélectionnez Tendances graph dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez .
6. Vérifiez ou ajustez les options de configuration d'impression.
7. Sélectionnez Impr.

Pour ajuster le nombre de tendances affichées sur la page des tendances graphiques :


1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet **R** à partir de l'écran **A**.
3. Sélectionnez ▼ sur l'écran **Revoir**.
4. Sélectionnez **Tendances graph** dans la liste déroulante.
5. Définissez **Groupe tend.** et sélectionnez l'option souhaitée.
6. Sélectionnez **Zoom** et sélectionnez la longueur souhaitée des données de tendances affichées sur l'écran actuel.
 - 8 min : affiche huit minutes de données de tendances. Il est possible d'afficher jusqu'à une heure de données.
 - 30 min, 1 h, 2 h, 4 h : affiche la durée sélectionnée des données de tendances. Il est possible d'afficher jusqu'à 4 heures de données.
 - 8 h, 12 h, 24 h, 48 h : affiche la durée sélectionnée des données de tendances. Il est possible d'afficher jusqu'à 240 heures de données.
7. Sélectionnez **Tendances** pour ajuster le nombre de paramètres affichés à l'écran à la fois.

REMARQUE

La sélection de l'affichage des tendances sur le poste **CentralStation/WorkStation** est indépendante.





A     

La page de revue des événements stocke les événements physiologiques et techniques sur un patient.

Pour afficher les événements au poste CentralStation/WorkStation :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.






ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran  . .
3. Sélectionnez  sur l'écran Revoir.
4. Sélectionnez Évén. dans la liste déroulante.

Pour imprimer une liste de tous les événements :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.





ou


1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran  . .
3. Sélectionnez  sur l'écran Revoir.
4. Sélectionnez Évén. dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez .
6. Vérifiez ou ajustez les options de configuration d'impression.
7. Sélectionnez Impr. tte la liste évén..
8. Sélectionnez Impr.

Pour imprimer une liste d'événements sélectionnés :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran  . .
3. Sélectionnez  sur l'écran Revoir.
4. Sélectionnez Évén. dans la liste déroulante.

5. Sélectionnez les événements souhaités.
6. Sélectionnez  .
7. Vérifiez ou ajustez les options de configuration d'impression.
8. Sélectionnez Impr. liste évén. sélectionnés.
9. Sélectionnez Impr.

Pour afficher et imprimer les détails de l'événement sélectionné :

1. Sélectionnez .

8. Sélectionnez **Impr. Détails évén.** sélectionnés.

9. Sélectionnez **Impr.**

Pour accéder aux options sur un des événements enregistré dans la liste des événements :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.

2. Sélectionnez l'onglet **R** à partir de l'écran **A**.







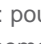

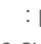
3. Sélectionnez  sur l'écran **Revoir**.

4. Sélectionnez **Évén.** dans la liste déroulante.

5. Sélectionnez l'événement souhaité.

6. Sélectionnez .


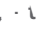



7. Sélectionnez l'option souhaitée.

- **V**  : pour verrouiller manuellement l'événement  à côté d'un événement indique qu'un événement verrouillé ne peut pas être supprimé.
- **D**  : pour déverrouiller l'événement.
- **S**  : pour supprimer l'événement.
- **S**   : pour sélectionner tous les événements de la liste des événements.
- **A**   : pour annuler la sélection de tous les événements de la liste des événements.
- **R**  : pour renommer un événement (si activé).
- **R** **a**  : pour autoriser l'enregistrement et l'impression d'une remarque avec l'événement.

Pour accéder aux options sur un des événements enregistré dans le détail de la fenêtre de l'événement :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

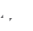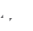ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran .
3. Sélectionnez  sur l'écran  Revoir.
4. Sélectionnez  dans la liste déroulante.

-DC 8(cli1_0z 2168un (en)/MCID 2150 >>BDC 2154 >>BDC BT /T1_0 ou1 Tf 0.021 Tw 8.75 0 0 8.75




Afficher et imprimer l'affichage complet

La page de revue de l'affichage complet stocke tous les tracés et les informations numériques collectées sur un patient pendant une période configurée.


Pour afficher les données de l'affichage complet au poste CentralStation/ WorkStation :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.




ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran .
3. Sélectionnez  sur l'écran Revoir.
4. Sélectionnez Affichage complet dans la liste déroulante.

Pour modifier les données affichées et stockées :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.


ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran .
3. Sélectionnez  sur l'écran Revoir.
4. Sélectionnez Affichage complet dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez Réglages.
6. Sélectionnez l'onglet Stockage.
7. Sélectionnez les tracés souhaités.
8. Sélectionnez l'onglet Affichage (Maximum : 3).
9. Sélectionnez les tracés souhaités à afficher.

Pour imprimer tous les tracés compressés de l'affichage complet :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet **R** à partir de l'écran **A**.
3. Sélectionnez ▼ sur l'écran **Revoir**.
4. Sélectionnez **Affichage complet** dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez .
6. Vérifiez ou ajustez les options de configuration d'impression.
7. Sélectionnez **Imprimer la vue d'ensemble des tracés**.
8. Sélectionnez **Impr.**



Pour sélectionner les segments du tracé compressé souhaités :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet **R** à partir de l'écran **A**.
3. Sélectionnez ▼ sur l'écran **Revoir**.
4. Sélectionnez **Affichage complet** dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez **Sélect.**
6. Cliquez avec la souris, maintenez-la enfoncée et faites-la glisser pour sélectionner le segment de tracé souhaité.














ou

6. Appuyez sur le tracé et faites glisser le doigt pour sélectionner le segment de tracé souhaité.
7. Si plusieurs segments de tracé sont souhaités, répétez l'étape 6.
8. Sélectionnez  à côté du tracé sélectionné pour annuler la sélection si nécessaire.
9. Sélectionnez  pour quitter la fonction de sélection.

Pour imprimer les segments du tracé compressé sélectionnés :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.









ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran .
3. Sélectionnez  sur l'écran .
4. Sélectionnez  dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez les segments du tracé compressé souhaités.
6. Sélectionnez .
7. Vérifiez ou ajustez les options de configuration d'impression.
8. Sélectionnez      .
9. Sélectionnez .

Pour afficher et imprimer les détails des segments de tracés sélectionnés :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.



ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran .
3. Sélectionnez  sur l'écran .
4. Sélectionnez  dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez les segments du tracé souhaités.
6. Sélectionnez .
7. Vérifiez ou ajustez les options de configuration d'impression.
8. Sélectionnez .
9. Sélectionnez .

Pour afficher et imprimer les détails d'un segment de tracé sélectionné :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.


ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet **R** à partir de l'écran **A**.
3. Sélectionnez  sur l'écran **Revoir**.
4. Sélectionnez **Affichage complet** dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez le segment du tracé souhaité.
6. Sélectionnez **Détail** ou double-cliquez sur le tracé compressé souhaité.
7. Sélectionnez .
8. Vérifiez ou ajustez les options de configuration d'impression.
9. Sélectionnez **Imprimer** les détails des tracés affichés.
10. Sélectionnez **Impr.**


Mesure calib.

Le compas permet de mesurer électroniquement les segments d'ECG tels que les intervalles PR et QRS. Le compas est disponible dans **Détails évén.** et **détails de l'affichage complet** dans le poste **CentralStation/ WorkStation**.

- Mesures de l'intervalle PR, QRS, QT et R-R

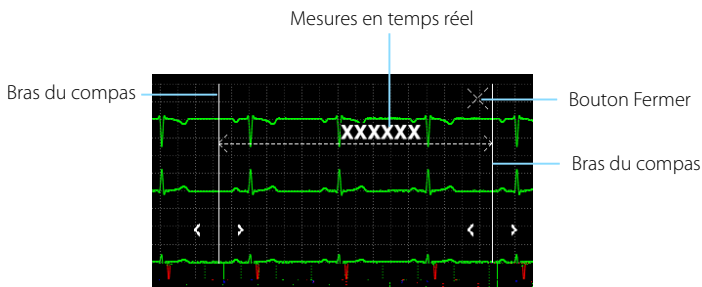

- Mesure ST

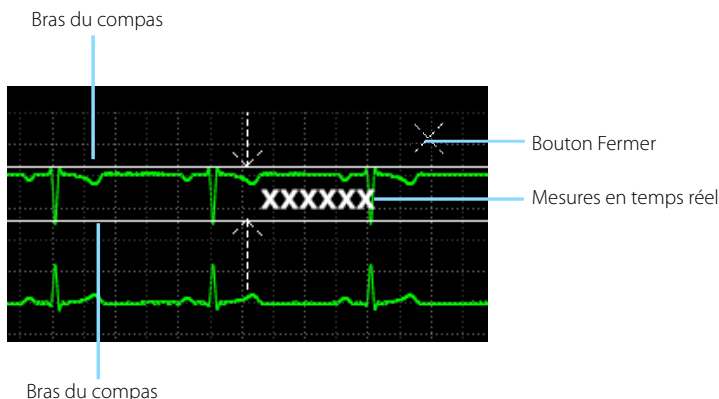

Pour mesurer l'intervalle PR, QRS, QT et R-R :

1. Entrez dans la vue détaillée de l'événement ou dans la vue détaillée affichage complet.
2. Sélectionnez **Compas**.
3. Cliquez avec le bouton de la souris sur la zone de tracé souhaitée, puis faites glisser le curseur horizontalement et maintenez-le jusqu'à l'emplacement désiré.

ou

4. Appuyez sur la zone de tracé souhaitée, puis faites glisser le doigt horizontalement jusqu'à l'emplacement désiré.
5. Sélectionnez **PR**, **QRS**, **RR** ou **QT** dans le menu **Compas** pour obtenir les valeurs mesurées. La valeur **QTc** est calculée une fois que les valeurs **FR** et **QT** ont été acquises.
6. Sélectionnez
 - **Enreg.** : pour enregistrer les valeurs de mesure de compas en tant qu'événement manuel dans la page **Revoir Evén.** Saisissez le nom et des commentaires comme vous le souhaitez et sélectionnez **OK** pour confirmer. Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés. Les valeurs mesurées sont affichées dans le premier tracé ECG et imprimées dans le détail des rapports.
 - **Réinitialiser** : pour effacer les valeurs mesurées.
7. Sélectionnez **X** pour quitter la fenêtre du compas.




Pour mesurer ST :

1. Entrez dans la vue détaillée de l'événement ou dans la vue détaillée affichage complet.
2. Sélectionnez **Compas**.
3. Sélectionnez **ST**.
4. Cliquez avec le bouton de la souris sur la zone de tracé souhaitée, puis faites glisser le curseur horizontalement et maintenez-le jusqu'à l'emplacement désiré.

ou







5. Appuyez sur la zone de tracé souhaitée, puis faites glisser le doigt horizontalement jusqu'à l'emplacement désiré.
6. Sélectionnez
 - **Enreg.** : pour enregistrer les valeurs de mesure de compas en tant qu'événement manuel dans la page Revoir Evén. Saisissez le nom et des commentaires comme vous le souhaitez et sélectionnez **OK** pour confirmer. Jusqu'à 32 caractères peuvent être entrés. Les valeurs mesurées sont affichées dans le premier tracé ECG et imprimées dans le détail des rapports.
 - **Réinitialiser** : pour effacer les valeurs mesurées.
7. Sélectionnez **X** pour quitter la fenêtre du compas.

Pour déplacer le compas :

- Lors de l'affichage des bras du compas, pointez à l'intérieur du compas, sélectionnez  pour déplacer le compas en entier.
- Lors de la mesure de l'intervalle PR, QRS, QT et R-R, sélectionnez  pour déplacer le compas horizontalement.
- Lors de la mesure ST, sélectionnez  pour déplacer le compas.

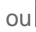Pour régler les bras du compas :

Lors de l'affichage d'un compas, ajustez les bras du compas pour modifier la différence de temps entre deux points.

- Lorsque le compas s'affiche en forme , sélectionnez  ou  pour déplacer le bras du compas horizontalement.
- Lorsque le compas s'affiche en forme , sélectionnez  ou  pour déplacer le bras du compas verticalement.




Accéder à la page de revue de l'ECG à 12 dér. :  a. ECG à 12 :  . av.

La page de revue de l'ECG à 12 dér. permet au médecin de visualiser et d'imprimer un rapport d'analyse ECG à 12 dér.

Pour afficher un rapport d'analyse ECG à 12 dér. :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.


ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet  à partir de l'écran  .
3. Sélectionnez  sur l'écran Revoir.
4. Sélectionnez ECG 12 dér. à partir de la liste déroulante.
5. Sélectionnez Vitesse pour ajuster la vitesse des tracés.
6. Sélectionnez Gain pour ajuster la taille des tracés.
7. Sélectionnez Disposition pour ajuster la disposition des tracés.
 - 12x1 : pour afficher les tracés ECG à 12 dér. sur une page dans une colonne.
 - 6x2 : pour afficher les tracés ECG à 12 dér. sur une page, dans deux colonnes de 6 lignes.
 - 6x2+1 : pour afficher les tracés ECG à 12 dér. sur une page, dans deux colonnes de 6 lignes, ainsi qu'un tracé Rythme au bas de la page.
 - 3x4+1 : pour afficher les tracés ECG à 12 dér. sur une page, dans 4 colonnes de 3 lignes, ainsi qu'un tracé Rythme au bas de la page.
 - 3x4+3 : pour afficher les tracés ECG à 12 dér. sur une page, dans 4 colonnes de 3 lignes, ainsi que trois tracés Rythme au bas de la page.

Pour imprimer un rapport d'analyse ECG 12 dérivations :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet **R** à partir de l'écran **A**.
3. Sélectionnez ▼ sur l'écran **Revoir**.
4. Sélectionnez **ECG 12 dériva** à partir de la liste déroulante.
5. Sélectionnez .
6. Vérifiez ou ajustez les options de configuration d'impression.
7. Sélectionnez **Impr.**


A r y t h m i e - S t a t i s t i q u e s

La page Statistiques d'arythmie permet au médecin d'afficher et d'imprimer les statistiques relatives à la valeur de FC et le nombre de chaque arythmie dans une période de temps donnée.

Pour régler l'heure, afficher et imprimer un rapport statistique sur l'arythmie :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.

ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez l'onglet **R** à partir de l'écran **A**.
3. Sélectionnez ▼ sur l'écran **Revoir**.
4. Sélectionnez **Statist. Arythm** dans la liste déroulante.
5. Sélectionnez **Zoom** pour ajuster la longueur de l'heure.
6. Sélectionnez .
7. Vérifiez ou ajustez les options de configuration d'impression.
8. Sélectionnez **Impr.**

AFFICHAGE CENTRALSTATION DISTANT*

Lorsqu'il y a plusieurs postes CentralStation sur le réseau, un médecin peut voir d'autres patients depuis un poste CentralStation distant.

REMARQUE

Un lit attribué désigne un lit qui est actuellement surveillé par un poste CentralStation à partir d'un autre poste CentralStation.




Pour plus de détails, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur du système central de surveillance BeneVision*.

Un médecin peut afficher à la fois les données patient historiques et en temps réel pour les patients surveillés par un poste CentralStation distant dans une

Pour afficher un patient depuis un autre poste CentralStation :

1. Sélectionnez  dans la mosaïque du patient souhaité.


ou

1. Sélectionnez la zone des paramètres ou la zone des tracés de la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez  à partir de l'écran Aff. lit.
3. Sélectionnez  .
4. Sélectionnez le service souhaité dans la liste déroulante à côté du  .
5. Sélectionnez le patient souhaité.

Effacer un lit attribué

Lorsque l'affichage à distance n'est plus nécessaire, le dispositif peut être retiré de l'écran Multilit (principal).

Pour effacer un lit attribué de l'écran Multilit (principal) :

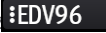1. Sélectionnez  (par exemple) dans la mosaïque du patient souhaité.
2. Sélectionnez Effacer lit attribué .


REMARQUE

L'effacement de la mosaïque n'efface que le patient de l'affichage. Cela ne libère pas le patient et ne le retire pas du poste CentralStation attribué.

MESSAGERIE*

La fenêtre Mssgrie permet la configuration des bipeurs pour le poste CentralStation/WorkStation.

Pour accéder à la fenêtre Messagerie :


1. Sélectionnez  sur l'écran Multilit (principal).
2. Sélectionnez Mssgrie dans la liste déroulante.
3. ~~Sélectionnez Ok pour confirmer.~~

Pour ajouter un bipeur :

1. Sélectionnez Attribution bipeur dans l'onglet dans la fenêtre Bipeur.
2. Sélectionnez Ajouter nouv. bipeur .

Pour attribuer un lit par saisie manuelle à un bipeur :

1. Cliquez sur le bouton **Saisie manuelle** dans la barre d'outils.


2. Sélectionnez  à côté du bipeur souhaité dans la liste des bipeurs.

3. Sélectionnez le bouton **Attribuer lit manuel**.

4. Saisissez le numéro de lit souhaité dans la boîte de dialogue de lit.

Attribution bipeur

Pour imprimer un rapport de messagerie :

1. Sélectionnez Attribution bipeur dans l'onglet dans la fenêtre Bipeur.
2. Sélectionnez  .

Mindray DS USA, Inc.
800 MacArthur Boulevard Mahwah, New Jersey 07430, USA
Tél. : 1.800.288.2121, 1.201.995.8000
www.mindray.com

i d ay